

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
 一般医療機器 短期的使用鼻咽頭エアウェイ 70260000

NAR鼻咽頭エアウェイ

再使用禁止

禁忌・禁止

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本体



潤滑性ゼリー

【原材料・寸法】

本体: ゴム

付属品: 潤滑性ゼリー

製品番号	外径	長さ	重さ
NAR0424	22FR	105mm	14.2g
NAR0422	24FR	110mm	14.2g
NAR0387	26FR	118mm	14.2g
NAR0034	28FR	125mm	14.2g
NAR0423	30FR	127mm	14.2g
NAR0388	32FR	120mm	14.2g

【使用上の注意】

1. 包装が開封、破損している場合は使用しないこと。
2. 開封後は早めに使用すること。
3. 鼻孔に発疹、かゆみ等の異常があらわれた場合は直ちに使用を中止し、医師、薬剤師に相談すること。
4. 本品は医師、もしくは十分トレーニングを受けた者が使用すること。
5. 包装に使用期限表示のないもの、使用期限後のものは使用しないこと。
6. 本品は単回使用である。

【貯蔵・保管方法及び有効期間等】

- ・ 常温の室温にて保管
- ・ 有効期限: パックに表示

【包装】 1個単位

【使用目的・効能又は効果】

気道の開存性を維持するために鼻孔から咽頭に挿入する。

【主要文献及び文献請求先】

アコードインターナショナル株式会社

【製造販売業者の名称及び住所等】

製造販売元: アコードインターナショナル株式会社
 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4
 TEL: 03-3299-6751 FAX: 03-3299-6752

製造元: ノースアメリカンレスキュー社
 North American Rescue, LLC.
 (アメリカ・サウスカロライナ州)

【使用方法】

1. 付属のゼリーを少量手に取り、鼻の周辺に縫って、なめらかにする。
2. ゆっくりとエアウェイを廻しながら鼻孔に挿入する。(強くしないこと。)