

SAMチェストシールバルブ2.0

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

パッケージ: パウチパック 約15.9cm x 25.4cm
重 さ: 約52g

チェストシール: 約23.4cm x 19.3cm
バルブ 高さ: 約1.5cm



【使用方法等】

1. 創傷の汚れをきれいにする。
2. パッケージを開け、チェストシールを取り出す。
3. タブを持ち、透明なライナーを剥がす。
4. チェストシールの接着面を下にして、創傷を中心に貼る。
5. 確実に閉塞するよう、チェストシールを上からしっかり押さえる。
6. チェストシールを剥がすときは医師の指導または監視下で行う。

【使用上の注意】

- ・ 包装が開封、破損している場合は使用しないこと。
- ・ 開封後は早めに使用すること。
- ・ 肌に発疹、かゆみ等の異常があらわれた場合は、直ちに使用を中止し、医師、薬剤師に相談すること。
- ・ 本品は医師もしくは十分なトレーニングを受けた者が使用すること。
- ・ 包装に使用期限の表示がないもの、使用期限後のものは使用しないこと。

【原材料】

チェストシール
表面: ポリウレタン
バルブ: ポリウレタン
裏面: ハイドロジェル
ライナー: ポリエステル

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 直射日光および高温多湿を避け、水漏れに注意し室温にて保管
- ・ 有効期限: パッケージに表示

【主要文献及び文献請求先】

アコードインターナショナル株式会社

【使用目的又は効果】

- ・ 傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。
- ・ 胸部の深部銃創、切傷、刺傷に対応し、創傷を閉塞する。
- ・ バルブは一方弁で、身体内の空気を外部へ排気し、外部からは入れない。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: アコードインターナショナル株式会社
151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷 1-9-4
TEL:03-3299-6751 FAX:03-3299-6752

製造業者: サムメディカルプロダクツ社
SAM MEDICAL PRODUCTS
(アメリカ・オレゴン州)